

管理医療機器

WATRON チップ

 [標 識 用 器 具]

実製品は写真と形状、
色が異なることがあります。

[本 体]

[キャップを閉めた状態]


インジェクタ

誤挿入防止ピン

プランジャー

1.4×10 mm モデル

マイクロチップ
1.4 mm × 10 mm
針外径
φ 1.8 mm

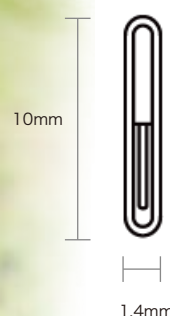

世界に一つの ID で、
大切な家族を守ります。

実製品は形状、色が異なることがあります。

名称 WATRON チップ（一般的名称：標識用器具）

性能又は効果 準拠規格：ISO11784 / 11785 動作周波数：134.2KHz

動作原理 電磁誘導方式により、リーダー（読み取り機）からマイクロチップの個体識別情報を読み取ることができます。

寸法

1.4 × 10 mm モデル			
マイクロチップ	1.4 mm × 10 mm	針外径	φ 1.8 mm

禁忌・禁止

再滅菌及び、再使用禁止



マイクロチップ実寸大

使用方法

準備

(1) 本品を滅菌バッグの上からマイクロチップリーダーでスキャンし、マイクロチップ、リーダー共に正常に機能していること、および本品の滅菌バッグに貼付されているラベル番号と、マイクロチップ番号が同一であることを確認する。

埋め込み

- (1) 対象動物をリーダーでスキャンして、マイクロチップが既に埋め込まれていないことを確認する。
- (2) 対象動物の毛の状態に応じて剃毛等の処置を行い、埋め込み部位の皮膚を消毒する。
- (3) 対象動物を適切に保定する。
- (4) 誤挿入防止ピンを取る。
- (5) 対象動物の頸部の皮下に、穿刺器を用いてマイクロチップを埋め込む。

埋め込み後の確認

- (1) マイクロチップが正常に機能していることを確認するために、再度対象動物をスキャンする。

使用上の注意

基本的注意

- ・本品は、定められた使用方法に従って操作してください。

取り扱い及び廃棄のための注意

- ・包装が破損又は汚損している場合や、製品に外観上の異常が認められる場合には使用しないでください。
- ・開封後はすぐに使用し、使用後は感染防止に留意し、地方公共団体条例等に従って適切に処分してください。
- ・使用期限が過ぎたものは使用しないでください。
- ・いったんインジェクタから脱落したマイクロチップは使用しないでください。

対象動物に関する注意

- ・犬又は猫（個体）によっては、マイクロチップが体内を移動することがあります。
- ・マイクロチップの埋め込み後、幼若な犬・猫において埋め込み部位の硬結や腫瘍がみられることがあります。症状が長期間持続又は悪化する場合には、獣医師の診察を受けてください。

取り扱い上の注意

- ・使用前に針管には触れないでください。
- ・穿刺する前にプランジャーを押さないでください。

その他の注意

- ・埋め込み部位に出血がみられたときは、清潔な脱脂綿で傷口を圧迫するなど適切な止血措置をとってください。

保管方法及び有効期間等

- ・有効期間：滅菌後 3 年間
- ・保管につきましては、水濡れに注意のうえ、直射日光を避けて、小児の手の届かない所に保管してください。

● 製造販売元



株式会社コスミック エム イー
〒333-0848 埼玉県川口市芝下 2-31-3
TEL: 048-268-9811 FAX: 048-269-0845

● 総販売元（製品に関するお問い合わせ先）

MC プランニング
〒664-0836 兵庫県伊丹市北本町 1-254-1-505
TEL: 06-6151-5151 FAX: 06-6151-5151