

指輪、つまなどで引っ掻きキズを作らないように注意してください。



ソックスを丸めて、つま先部分を土ふまずまでキッチと入れます。



足首のところまで引き上げかかとにフィットするように位置を合わせます。



両手の親指を内側に入れて均等に引き上げてください。



たるみ、しわがないように慎重に伸ばしてください。

サイズ選択の目安です

足のサイズ	22～25cm	25～26.5cm	26.5～28cm
身長	160cm	155cm～ 175cm以下	170cm以上
サイズ	S-M	L	LL

ポリウレタン弾性繊維ライクラ® (インビスタ社登録商品)と東レの高級吸放湿性ナイロン、キューブ® を使用した疲れにくく着用しやすい弾性ストッキングです。

ご注意

- 正しいサイズのもを着用してください。
- 着圧が強くなりますので、重ねて着用しないでください。
- 着用時に痛みを感じた場合、皮膚に異常を感じた場合はすぐに使用を中止してください。
- 血圧の高い方、糖尿病の方は、心臓・肝臓に障害のある方、皮膚に異常のある方、血行障害のある方は、医師に相談の上着用してください。
- 寝る時は着用しないでください。

お手入れ

- 洗濯表示に従って洗濯してください。
- 色の異なるものと一緒に洗濯しないでください。
- 塩素系漂白剤は生地を傷めますので使用しないでください
- アイロン、乾燥機は使用しないでください。生地の伸縮性を悪くします。

素材：ナイロン90% ポリウレタン10%



Made in Japan

総販売元

セダージャパン株式会社

〒101-0072 東京都千代田区飯田橋1-12-14

問い合わせ先

E-mail cedarjapan@nifty.com

販売名：プラスワンマジック®Jukiner

一般医療機器 一般的名称：弾性ストッキング

包装：2本(1ペア)/袋

医療機器製造販売届出番号：11B1X10022000001

製造販売許可番号：11B1X10022

機械器具12 理学診療用器具

製造販売業者

株式会社コスミックエムイー

〒333-0848 埼玉県川口市芝下2-31-3


製造ロット番号：

プラスワンマジック® Jukiner (ジュキナー)は、長時間座位、立位で仕事をする方の筋肉をサポートし、血行を改善し、むくみを軽減します。

メディカル弾性ストッキング

プラスワンマジック® Jukiner

★男女兼用★

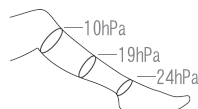

一般社団法人 人間生活工学研究センターの調査した、約6,700人の日本人の足の寸法の平均値から算出した設計となっています。

こんな方におすすめします!!

1

ランニングなどの運動で足がむくみやすい方

2

歩くと足がむくんだり、足がつる(こむら返り)方



3

足先が冷えて、お困りの方



長時間の海外旅行に、通勤に

むくみを軽減できる最適なストッキングです!

セダージャパン株式会社