

患者様にやさしく、スマートな

電子駆血帯 マサキカフ®



平成30年度 東京都新製品・
新技術開発助成事業採択製品

特許第5869327号(日本)
特許第9,662,121号(米国)
特許第279355号(EU)
特許出願中(中国)
意匠登録第1628146/7(日本)
意匠登録第5105452(中国)
意匠登録第5277554(中国)

M
A
S
A
K
I
C
U
F
F

電子駆血帯で施設のイメージアップ

採血時の患者様の不安や苦痛を低減し患者様の満足度が向上

※一度ご利用になった患者様の多くが今後も電子駆血帯での駆血を希望されています




写真はくまモンバージョン ©2010熊本県くまモン#K31504

*タイプ（スタンダードまたはくまモンバージョン）は購入時にご指定ください

*商品の色調は印刷のため実物と異なる場合があります


穿刺と駆血の関係

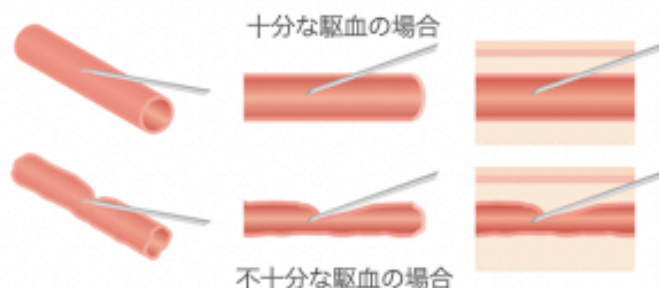

怒張が不十分なままで、穿刺すると血管が逃げたり、留置針の先端が血管外に逸脱してしまうことがあるので、目標とする血管を可能な限り怒張させておくことは、穿刺を成功させる上で重要となります

最適駆血圧まで自動で加圧・保持

- 電子駆血帯は、穿刺のために上腕又は下腿を加圧して静脈を怒張させる電子制御の駆血帯です
- エビデンスに基づいた一般的指標とされる最適駆血圧まで自動的に加圧し、圧を保持する医療機器です
- 動脈を締め付けすぎないため採血量が多い場合でも血流不足が発生しにくくなります
- 静脈穿刺が難しいときに、その要因から駆血圧を除外する一助になります

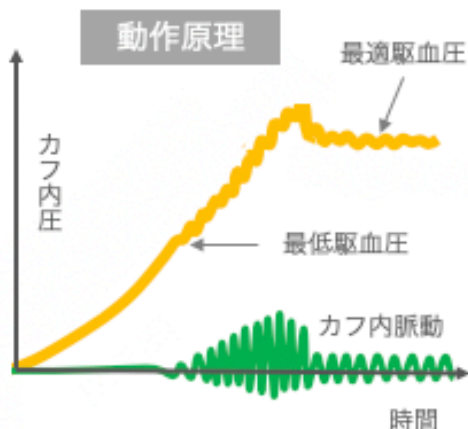

簡単操作で医療スタッフの負担を軽減

経験値に頼る必要がないので採血業務を標準化できます

弊社実施の患者アンケートでは32%の方が駆血ゴムバンドやベルトで強く締め過ぎて痛い等苦痛を感じたことがある、52%の方が看護師さんによって駆血帯を縛る強さに違いを感じると回答されています

主な特徴


- 簡単操作で最適駆血圧まで自動的に加圧できます
- リモートスイッチでON/OFF可能なので両手を患者様に添えたままで使用できます
- クイックリリースバックルにより点滴ルートを確認したままで簡単に装着・取り外しが可能
- コンパクトサイズで持ち運びに便利
- 経験の少ない看護師さんでも、血管を取りにくい患者さんの採血が容易になります

専用収納ケース

- 専用収納ケースに本体とリモートスイッチ、試用電池(単4 x 2本)が同梱されています
- その他、操作説明書、添付文書が化粧箱に同梱されています



ご使用方法

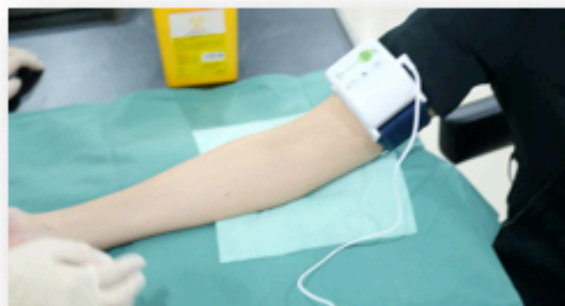

<https://www.dreaminpocket.com>
動画でご覧になれます



- ① リモートスイッチのプラグを本体の差込口に挿入し、カフを上腕又は前腕、下腿に装着し、本体の電源を入れます
- ② 加圧をします (AUTO/M/Lの3モードがありますが通常はAUTOモードのみ使用します)
 - AUTO：自動加圧 本体又はリモートスイッチのSTART/RELEASE釦を押します
 - M：マニュアル加圧 (設定圧120mmHg) M釦を押します
 - L：低圧加圧 (設定圧20mmHg) L釦を押します
- ③ 緑色の三角ランプがSTART/RELEASE釦からREADYランプ方向に流れるように点灯します
- ④ 最適駆血圧又は設定圧に到達後約15秒後にREADYランプが点灯しますので、十分な駆血が得られましたら、穿刺してください
- ⑤ 圧力を開放するときは本体またはリモートスイッチのSTART/RELEASE釦を押します
- ⑥ 電源を切る場合は、電源釦を押します



主な仕様

*お断りなく仕様を変更する場合がございますのでご了承ください

販 売 名 称	マサキカフ168A-S (スタンダード) マサキカフ168A-K (くまモンバージョン)
一 般 的 名 称	電子脈血帯
J M D N コー ド	71063001
J A N コー ド	4580047120092 (スタンダード) 4580047120108 (くまモンバージョン)
医 療 機 器 届 出 番 号	11B1X10022000004
使 用 目 的 又 は 効 果	一般医療機器 (クラスI) 機械器具(56) 採血又は輸血用器具
構 造 及 び 原 理	穿刺のために上腕又は下腿を加圧して静脈を拡張させる事に用いる
本 体 重 量	約150g (公差: ±15%)
外 形 寸 法 (本 体)	79.5(W) x 41(H) x 60(D) mm ※カフ部を除く
外 形 寸 法 (リ モ ー ト ス イ ッ チ)	56(D) x 22(H) mm ケーブル長: 800mm (公差: ±15%)
定 格 電 圧	3V 単4アルカリ電池x2個
電 撃 に 対 す る 保 護 の 形 式	内部電源機器
電 撃 に 対 す る 保 護 の 程 度	B形装着部
消 費 電 流	0.355A
測 定 方 式	オシロメトリック法
圧 力	最大200mmHg ±10% ※圧カゲージにより測定
対 象 腕 周	17~38cm
付 属 品	試用電池2本、収納ケース、取扱説明書 (品質保証書付)、医療機器添付文書

専用ディスプレイブルカバー

感染防止



収納箱上面に使用方法が記載されています
 価格: ¥3,980/箱 (税別、送料無料)
 枚数: 300枚/箱
 JANコード: 4582562440037

▲ 安全に対するご注意

ご使用前に必ず「取扱説明書」をお読みの上、正しく安全にお使い下さい

製品のお問い合わせ、別売品や消耗品のご注文は

ドリームインポケットお客様サポートまで

<https://www.dreaminpocket.com/contact>

TEL: 03-5579-6175 FAX: 03-5579-6152

〒104-0032 東京都中央区八丁堀3-25-8 八丁堀陽光ビル2階



お問い合わせ、ご用命は